



**Dalbo® Abutment med
Dalbo®-PLUS.**


Med originalen fra
Cendres+ Métaux SA
er kuglerne støbt.

C CENDRES⁺
MÉTAUX

Dalbo® Abutment med Dalbo®-matricer.

Originalt kugleankersystem fra Cendres+Métaux.

Dalbo® Abutment er del af det renommerede og klinisk afprøvede Dalbo®-system. Funktionsprincippet er blevet anvendt med succes siden 1950'erne og har bevist sin kliniske effektivitet i millioner af tilfælde.

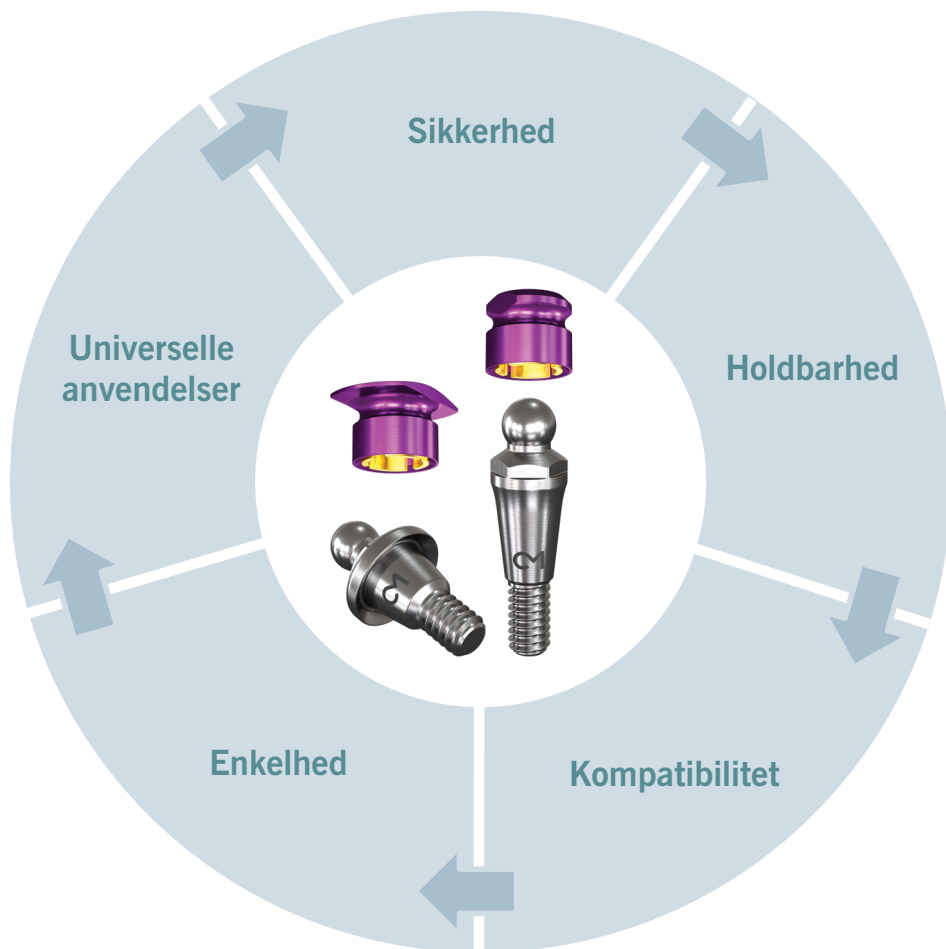

Dalbo® Abutment.

Dine fordele.

Variabel


Der fås tre gingiva-højder for hver grænseflade.

Økonomisk og fleksibel

Et enkelt, identisk indskruningsværktøj kan benyttes til alle systemer.

Kompatibilitet

Alle Dalbo®-matricer er kompatible med Dalbo® Abutment. Der er altid en passende løsning til patienterne.

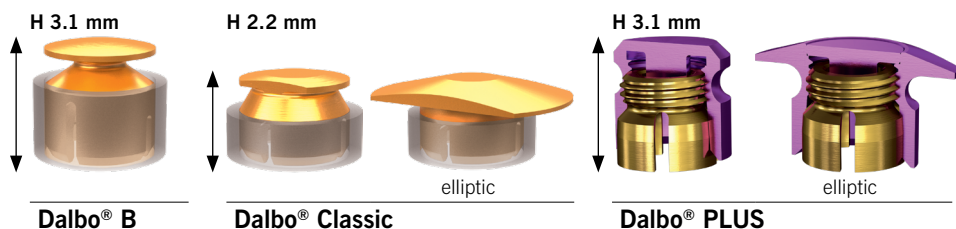

Med Dalbo®-PLUS fås komfortable løsninger.

- Aktiveringen er hurtig og nem vha. specialinstrumentet.
- Hvis protesen ikke længere holder, kan den næste tykkere lamel-retentionsindsats skrues i.

Dalbo® Abutment.

Kompatible grænseflader.

Implantatsystem		Abutment-højder (GH)
Astra Tech	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6	GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2	GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8	GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0	GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0	GH3, GH4 y GH5
BioHorizons	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 3.5	GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 4.5	GH3, GH4 y GH5
Camlog	Dalbo® Abutment Camlog® 3.8	GH1, GH2 y GH3
	Dalbo® Abutment Camlog® 4.3	GH1, GH2 y GH3
	Dalbo® Abutment Conelog® 3.8/4.3	GH3, GH4 y GH5
DENTSPLY	Dalbo® Abutment DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0	GH3, GH4 y GH5
MiS	Dalbo® Abutment MiS® Seven 3.5	GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment MiS® Seven 4.5	GH3, GH4 y GH5
Nobel Biocare	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3	GH1, GH2 y GH3
	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5	GH1, GH2 y GH3
	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0	GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® NP 3.5	GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0	GH3, GH4 y GH5
Osstem	Dalbo® Abutment Osstem® US Regular 4.1	GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment Osstem® TS Mini 3.5	GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment Osstem® SS Regular 4.8	GH1, GH2 y GH3
Straumann	Dalbo® Abutment Straumann® RN 4.1/4.8	GH1, GH2, GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment Straumann® RC 4.1/4.8	GH1, GH2, GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment Straumann® NC 3.3	GH2, GH3, GH4 y GH5
Zimmer	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5	GH3, GH4 y GH5
	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5	GH3, GH4 y GH5


Dalbo® PLUS.

Indstilling af holdestyrken.

Dalbo®-PLUS kan tilpasses individuelt og ideelt til den pågældende mundsituation på en helt unik måde. Den progressivt tiltagende holdekraft øges med ca. 200 g pr. $\frac{1}{4}$ -omdrejning.


Lamel-retentionsindsatsen kan udskiftes efter behov uden at afmontere matricen. I tilfælde af fremskreden kugleslid udskiftes de med tuning lamel-retentionsindsatsene.

Holdekraft afhængigt af aktivering

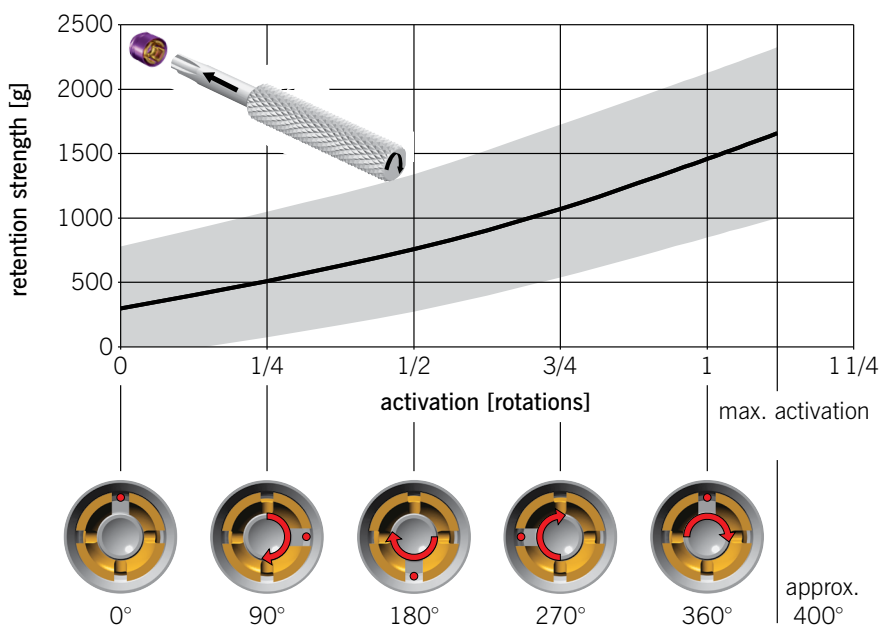

Dalbo®-PLUS.

Tuning lamelretentionsindsatser.

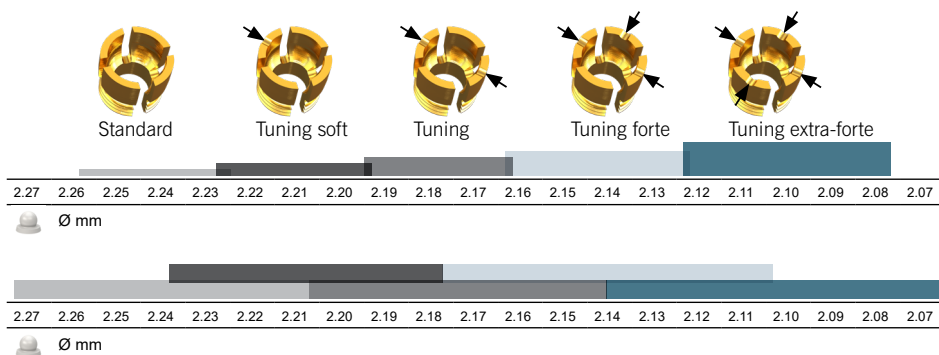

Dalbo®-PLUS har ud over standard lamel-retentionsindsatsen yderligere fire tuning-lamel-retentionsindsatser:

- Tuning soft lamel-retentionsindsats (et indhak); stærk friktion
- Tuning lamel-retentionsindsats (to indhak); ekstra stærk friktion
- Tuning forte lamel-retentionsindsats (tre indhak); høj friktion
- Tuning extra-forte lamel-retentionsindsats (fire indhak); ekstra høj friktion

Vores kugleanker diameter på 2,25 mm har manifesteret sig på markedet som standard-produkt til de fleste systemer. Erfaringer og undersøgelser af konkurrerende produkter har kunnet påvise, at selv de mindste forskelle, såsom valg af materiale, geometrien eller toleranceområdet, kan reducere friktionsområdet i Dalbo®-PLUS lamel-retention-sindsatsen. Til øgning af friktionsområdet og til efterbehandling af allerede slidte kugle hoved-patricer fås fire yderligere lamel-retentionsindsatser.

På grund af de forskelligartede indhak på lamellerne er det let at se forskel på den "normale" retentionsindsats.

Dalbo® System.

Instrumenterne.

Destornillador para pilar (kat.-nr. 07000266)



Et værktøj uafhængigt af system. Passt in jede Drehmomentratsche med en ISO-adapter (vinkelhåndstykke).

Dalbo®-PLUS.

Skruetrækker / aktivator (kat.-nr. 072609)



Benyttes til aktivering, deaktivering og fjernelse af lamel-retentionsindsatsen til systemet Dalbo®-PLUS.

Instrumentet med fire knaster skubbes ind i lamel-retentionsindsatsen i korrekt position indtil stoppet. Indstillingen og holdestyrken opnås ved drejning; når der drejes med uret, øges holdestyrken, og omvendt reduceres den.

Dalbo®-PLUS måleinstrumenter

Med de to instrumenter er det muligt at undersøge oralt, om kuglepatricen har tegn på slid.

Patrice-målelære (kat.-nr. 07000027)



Muliggør en kontrol af den indstillede holdestyrke i protesen uden for munden. Det nominelle mål for kuglediameteren ifølge patrice-målelæren er 2,245 mm og svarer til de fleste systemer på markedet, der benyttes idag.

Matrice-målelære (kat.-nr. 07000024)



Er beregnet til kontrol og udregning af den ønskede Dalbo®-PLUS matrice-holdestyrke i patientens mund og valg af den ideelle lamel-retentionsindsats. Levering uden monteret lamel-retentionsindsats.

Guaranti:



15 års garanti på produktet
samt refundering af
implantater og behan-
dlingsomkostninger op til
maksimalt CHF 1500.00.

Yderligere informationer:



Alt om Dalbo®-systemet
findes på vores hjemme-
side.

Cendres+ Métaux SA

Rue de Boujean 122
CH-2501 Biel/Bienne
Phone +41 58 360 20 00
Fax +41 58 360 20 10
www.cmsa.ch